

SPORT-ELEC®

ELECTROSTIMULATION




Force Tonic

MODE D'EMPLOI

SPORT-ELEC® GROUP - 31 Rue du Val Breton - BP 35 - 27520 BOURGTHEROULDE
Tél. + 33 (0)2 32 96 50 50 - Fax. + 33 (0)2 32 96 50 59 - info@sport-elec.com
www.sport-elec.com

DESCRIPTION DU BOÎTIER FORCE TONIC

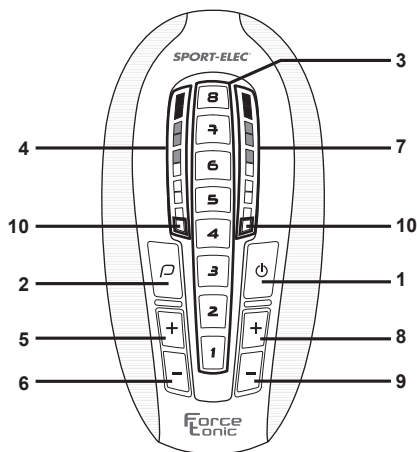

1. Bouton ON/OFF/arrêt d'urgence.
2. Bouton de sélection des programmes.
3. Indicateur de programmes.
4. Indicateur de niveau de puissance du canal A.
5. Bouton d'augmentation de la puissance du canal A (niveau 0 à 64).
6. Bouton de diminution de la puissance du canal A (niveau de 64 à 0).
7. Indicateur de niveau de puissance du canal B.
8. Bouton d'augmentation de la puissance du canal B (niveau 0 à 64).
9. Bouton de diminution de la puissance du canal B (niveau de 64 à 0).
10. Clignote lorsque les électrodes sont déconnectées.

LES PROGRAMMES

PROG 1 Préparation

Pour préparer et échauffer les muscles du cheval avant un effort intense. Les fréquences changent périodiquement et s'échelonnent pour offrir un véritable effet massage.

Durée : 20 min

PROG 2 Silhouette sculpt

Pour raffermir mais également pour donner du volume musculaire à la suite d'une période d'inactivité. Les fréquences varient de 30 à 60 Hz alternées par des fréquences de récupération active de 10 Hz et 3 Hz pour travailler la résistance du muscle.

Durée : 40 min

PROG 3 Muscle tonic

Musculation plus soutenue pour travailler des zones ciblées. Les fréquences varient de 70 à 100 Hz alternées par des fréquences de récupération active de 3 Hz pour travailler la tonicité et la force musculaire.

Durée : 20 min

PROG 4 Massage relaxant

Soulager la fatigue musculaire et permet de récupérer après l'effort. Les fréquences se modulent périodiquement, et offrent les bienfaits d'un massage de relaxation.

Durée : 20 min

PROG 5 Récupération

Grâce au changement rapide des fréquences, ce programme permet aux muscles de récupérer plus rapidement par les effets relaxants.

Durée : 20 min

PROG 6 Développement

Ce programme permet d'améliorer les acquis au niveau de la forme musculaire.

Durée : 40 min

PROG 7 Entretien

Ce programme permet de conserver les acquis au niveau de l'endurance et de la résistance et du volume musculaire.

Durée : 20 min

PROG 8 Sudoloris

Ce programme soulage efficacement les tensions musculaires.

Durée : 20 min

À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL

Vous venez d'acquérir un appareil professionnel performant et puissant.

Vous devez prendre le temps de découvrir son fonctionnement.

- 1 - Lire attentivement le mode d'emploi
- 2 - Avant usage, mettre des piles dans votre appareil

AVANT TOUT

- Il est obligatoire de demander un avis vétérinaire en cas de blessure, de maladie, de symptômes anormaux : mauvaise posture, animal couché...
- Force Tonic permet de faire travailler les muscles du dos et des fessiers des chevaux sportifs ou non.
- Force Tonic est utilisé par des vétérinaires, des clubs hippiques, des professionnels et des particuliers.
- Ne pas utiliser sur d'autres parties du corps du cheval que celles pour lesquelles les accessoires ont été conçus.
- Fonctionne uniquement sur piles. Ne pas relier à une autre source d'alimentation.
- Ne pas laisser à la portée des enfants

NE PAS UTILISER

- En cas d'inflammation ou de lésions cutanées
- Sur des juments en gestation
- Sur l'aire cardiaque
- dans un endroit humide
- à proximité de machines électriques reliées au secteur ou à la terre (tuyau relié à la terre).
- A proximité d'un appareil de thérapie à ondes courtes.

I. INSERTION DES PILES

Vérifier que l'appareil est éteint.

Ouvrir le compartiment à piles, y introduire 3 piles de 1,5 V AA type LR6, puis refermer le boîtier.

Respecter les polarités + et - .

Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves.

Ne pas utiliser de piles rechargeables.

Pour une utilisation optimale de votre appareil, il est conseillé d'utiliser des piles alcalines de bonne qualité.

II. MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

A / Présentation de l'appareil

Cet appareil d'électromusculation est à la pointe de la technique, il respecte les normes en vigueur dans le domaine d'application médicale.

L'interface a été simplifiée au maximum.

Les 8 pictogrammes rétro-éclairés indiquent le programme sélectionné par appui(s) sur la touche "P".

2 échelles de voyants de chaque côté de l'appareil (1 par canal) indiquent les 30 niveaux de puissance.

Vous trouvez aussi 6 touches de commandes (schéma page ci-contre) :

- 1 touche Marche/Arrêt (touche rouge) - appui court
- 1 touche "P" pour choisir les programmes - appui court
- 2 touches "+" et 2 touches "-" pour ajuster la puissance de la stimulation indépendamment pour chaque canal (appui court).

Note : Un appui long (1 sec) sur la touche "-" permet de passer au niveau de puissance zéro rapidement.

B / Fonctions de l'appareil

Étape 1 Marche / Arrêt “⏻”

- Un appui court sur la touche “⏻” met l'appareil en marche.
- À chaque mise en marche, l'appareil effectue un auto-test sur 11 paramètres de sécurité. Lors de l'auto-test, l'ensemble des voyants est allumé durant ½ seconde.
- Si un défaut interne est détecté, tous les pictogrammes clignotent et l'appareil s'arrête. Renvoyez l'appareil au centre S.A.V. de votre revendeur.
- L'auto-test ne détecte pas les piles usées.
- Pour arrêter l'appareil, appuyez sur la touche “⏻”.

Note : Un appui long au démarrage (plus de 3 sec) déclenche l'auto-test.

Étape 2 Choix d'un programme “P”

Pour sélectionner un programme, faites un ou plusieurs appuis courts sur la touche “P”.

Dès qu'un programme est sélectionné, le pictogramme correspondant s'allume.

Une fois le programme choisi, augmentez la puissance en appuyant sur une des touches “+”.

Pendant le déroulement du programme la touche “P” est inactive.

Étape 3 Fin du programme - Arrêt en cours

À la fin de la séance, l'appareil s'arrête automatiquement.

Pour arrêter l'appareil en cours de programme, remettez les 2 touches de puissance à 0 en appuyant sur les touches “-”, ou en appuyant sur la touche “⏻”.

Étape 4 Réglage de la puissance

La puissance est fractionnée en 10 segments : 5 segments verts, 3 segments orange et 2 segments rouges.

Appuyez sur la touche “+” pour changer de niveau.

Vous disposez de 30 niveaux pour régler la puissance de 0 à 30.

Étape 5 État des piles

- Si les piles sont “chargées”, pas de clignotement.
- Si les piles sont “faibles”, deux voyants orange clignotent. Votre appareil fonctionne encore.
- Si les piles sont “usées”, deux voyants rouge clignotent. Votre appareil s'arrête, y compris au cours d'un programme. Changez les piles.

Étape 6 Déconnexion

Votre appareil est doté d'un détecteur de déconnexion d'électrodes.




En cas d'absence de contact entre l'électrode et le corps du cheval, le passage du courant est interrompu sur le canal concerné. (canal A = beige / canal B = orange).

Vous êtes averti d'une déconnexion par le clignotement d'un voyant vert durant 30 sec.

Si une des électrodes n'est en contact avec la peau, le courant ne passe pas.

III. UTILISATION DE L'APPAREIL

A. Positionnement de l'appareil

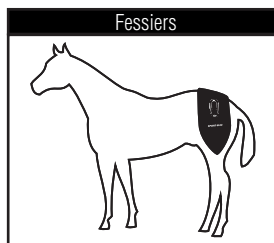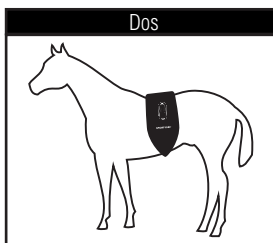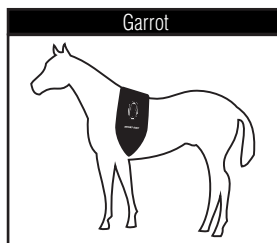

Force Tonic entraîne des contractions musculaires qui ne sont pas toujours visibles à l'œil nu.

B. Électrodes intégrées à la couverture

Ne jamais utiliser la couverture sans crème.

Vérifiez que votre appareil Force Tonic est à l'arrêt.

La couverture possède des électrodes intégrées sur lesquelles vous devez appliquer la crème de contact (fournie spécialement conçue par SPORT-ELEC®) et ce sans hésiter sur la quantité.

Cette crème favorise l'électroconductivité entre les électrodes et le cheval.

Ses propriétés électroconductrices améliorent le confort d'utilisation et l'efficacité de la stimulation.

Si vous souhaitez commander une nouvelle crème, appelez le 02 32 96 50 50, ou adressez-vous à votre revendeur habituel.

Ne pas utiliser d'autre crème que celle fournie par SPORT-ELEC®

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI de la crème

- En cas d'allergie, arrêter l'application de la crème et cesser l'utilisation.
- Ne pas avaler.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- En cas de contact avec les yeux rincer avec de l'eau.

C. Connexion de l'appareil

Prenez les connectiques de votre boîtier et branchez-les aux fiches de la couverture par groupe de 2 en respectant les couleurs.

Accrochez l'appareil sur la couverture grâce au système cousu à cet effet.

D. Mise en route

Mettez en route votre appareil en suivant la procédure de "Mise en marche de l'appareil" (paragraphe II).

Les contractions doivent être fermes mais ne jamais provoquer de douleur.

Vérifiez le comportement de votre cheval à ce moment pour les détecter.

Si vous pensez qu'une douleur est présente, diminuez les puissances, déplacez la couverture et remontez progressivement la puissance.

Les réglages étant ainsi optimisés, laissez travailler l'appareil pendant toute la durée du programme.

ÉTAPE 1 choix du programme

Sélectionnez le programme souhaité (de 1 à 8).
Voir description des programmes p. 2.

ÉTAPE 2 Arrêt du programme

Une fois le programme terminé, éteignez l'appareil puis débranchez les connectiques.
Enlevez la couverture de l'appareil. Nettoyez les électrodes intégrées avec un chiffon légèrement humide et laissez sécher à l'air libre. (Ne pas la ranger encore humide.)
Ne pas utiliser de détergent, de javel.

ÉTAPE 3 Relancer un programme (optionnelle)

Il est possible de recommencer le cycle d'un programme sur une autre zone musculaire ou de changer de programme en restant sur la même zone musculaire sans dépasser toutefois 40 min d'utilisation (de phase active) par zone musculaire et par jour.

ÉTAPE 4 Nettoyage du boîtier

Le boîtier et les câbles de l'appareil peuvent être nettoyés avec un chiffon imbibé de solution désinfectante (type Mercryl) diluée avec de l'eau au 1/10^e.

STOCKAGE

Température d'environnement entre 5 et 45°C
Humidité relative entre 20 et 65%

RECOMMANDATIONS

Lorsque vous vous séparez de votre produit, veillez à respecter la réglementation nationale : nous vous remercions de le déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'assurer son élimination de façon sûre dans le respect de l'environnement.

GARANTIE

Nous accordons une garantie de 24 mois sur les produits que nous distribuons à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, nous prendrons à notre charge, la réparation des vices de fabrication ou de matières, en nous réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou changées ou encore si l'appareil lui-même doit être échangé. Les frais de ports restent à votre charge. Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (choc, branchement sur courant continu, erreur de voltage, détartrage...), l'usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement, ni à la valeur de l'appareil, excluent toute prétention à la garantie. La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées ou si des pièces de rechange ne provenant pas de la même marque ont été utilisées. La garantie ne sera valable que si la date d'achat ainsi que le cachet et la signature du magasin figurent sur la carte de garantie ou sur présentation du ticket de caisse. Toute autre forme de prétention à la garantie est exclue, sauf si des dispositions légales spécifient le contraire.

SPORT-ELEC GROUP - 31 rue Val Breton B.P. 35 - 27520 BOURGTHEROULDE

CARTE DE GARANTIE / GARANTIE-KARTE / WARRANTY CARD / GARANTIA
24 MOIS / 24 MONATE / 24 MONTHS / 24 MESES / 24 MAANDEN

FORCE TONIC

Nom / Nahme / Name / Nombre / Naam

Adresse / Anschrift / Address / Dirección / Adres

Code Postal / Postleitzahl / Postcode / Código Postal

Ville / Stadt / City / Ciudad / Stad

Défaut constaté / Defecto advertido / Waargenomen defecten/

Festgestellten Mängel / Observed defect :

Date d'achat / Einkaufsdatum / Date of purchase/ Fecha de compra / Verkoopsdatum

CACHET DU REVENDEUR / STEMPEL VOM HÄNDLER /
STAMP OF RETAILER / SELLO DEL VENDEDOR / STEMPEL VAN DE VERKOPER



En cas de panne retournez l'appareil accompagné de cette carte de garantie à votre revendeur.
Im Garantiefall, senden Sie bitte das Gerät mit der Garantiekarte an unsere Kundendienststelle.
En caso de defectos, por favor entregue al vendedor el equipo junto con esta garantía.
In geval van defect stuur het artikel terug naar de verkoper vergezeld van deze garantiekaart.